

AIRPHYSIO

Fisioterapia delle vie aeree per una respirazione migliore

Terapia pressione espiratoria positiva oscillante



VINCITORE
PREMIO PER IL
MIGLIOR
PRODOTTO 2017



Terapia pressione espiratoria
positiva oscillante OPEP Dispositivo
per la rimozione del muco
e l'espansione polmonare

AirPhysio® è un dispositivo portatile per la fisioterapia polmonare privo di farmaci. Utilizza pressione espiratoria positiva (OPEP) oscillante per creare pressione che provoca l'allentamento del muco e si muove progressivamente lungo le vie respiratorie, fino alla gola, fino a quando non può essere espirato o inghiottito.

Il dispositivo **AirPhysio®** aiuta anche ad aumentare la capacità polmonare e aprire le vie respiratorie bloccate e semichiuse. La terapia OPEP ha dimostrato di essere un mezzo efficace per liberare le vie aeree per gli individui con una qualsiasi delle seguenti condizioni respiratorie:

- Asma;
- Atelettasia;
- Bronchiectasia;
- Malattie polmonari ostruttive croniche (BPCO), come la bronchite cronica e l'enfisema;
- Fibrosi cistica;
- Altre condizioni che producono secrezioni trattenute.

Il dispositivo **AirPhysio®** può anche essere utilizzato come terapia complementare per prevenire complicazioni polmonari nei pazienti dopo un intervento chirurgico (cioè interventi chirurgici cardiaci e addominali). L'uso del dispositivo **AirPhysio®** facilita la mobilitazione della secrezione, previene l'atelettasi e aumenta il volume polmonare dei pazienti postoperatori.

Come usare AirPhysio®


Utilizzare il dispositivo per un massimo di 10 min., una o due volte al giorno quando si verificano sintomi o come richiesto. Per mantenere l'igiene polmonare e la massima capacità polmonare, utilizzare almeno una volta alla settimana dopo la cessazione dei sintomi, in quanto ciò contribuirà a mantenere una migliore respirazione.

Come funziona AirPhysio®

Quando si espira attraverso il dispositivo, viene creata una pressione positiva nei polmoni che aiuterà a rinforzare e promuovere l'espansione polmonare. Questa pressione viene creata, anche quando la sfera in acciaio non si muove. Man mano che la forza polmonare aumenta, il respiro muoverà il cuscinetto a sfera d'acciaio, sollevandolo sopra il cono, rompendo la guarnizione tra il cono e il cuscinetto a sfera. Il movimento del cuscinetto a sfera in acciaio crea una pressione oscillante per aiutare le vibrazioni delle vie aeree che aiuteranno ulteriormente ad allentare il muco dalle pareti polmonari.

Come utilizzare AirPhysio® :

1. Prendere un bicchiere d'acqua e una scatola di fazzoletti, rilassarsi e assumere una corretta postura seduta o in piedi.
2. Inalare lentamente oltre un respiro normale, ma non riempire completamente i polmoni.
3. Trattieni il respiro per 2/3 secondi.
4. Mettere il dispositivo **AirPhysio®** in bocca, espirare in modo ragionevolmente veloce ma non troppo forte, utilizzando la respirazione addominale / profonda. Non svuotare i polmoni e usare burro cacao se le labbra si asciugano nel processo.
5. Una volta che i polmoni sono alla capacità polmonare ottimale per sollevare il cuscinetto, regolare l'inclinazione per sentire le vibrazioni all'interno del petto e mantenere le guance rigide. Se il cuscinetto a sfera non si muove è normale all'inizio. Continuare a utilizzare **AirPhysio®** fino a quando la forza polmonare migliora nel tempo.
6. Dopo aver espirato attraverso il dispositivo, si può sentire muco accumularsi nella parte posteriore della gola. Tossire per espellere il muco. Se dopo aver usato **AirPhysio®** si tossisce, il muco continuerà non salirà fino alla gola (anche dopo 5-10 minuti di utilizzo). E si può ingoiare il muco o sputarlo, come per normali processi corporei.
7. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per un massimo di 5 minuti. Sentiti libero di fermarti e rilassarti mentre fai respiri profondi per evitare la leggerezza. Ricomincia quando sei pronto.

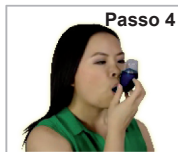

Attenzione: Questo metodo può stordirti. Questo è normale a causa della quantità di anidride carbonica esalata. Quando ti senti stordito, fai una pausa e respira normalmente fino a quando la sensazione passa. Se esagerate e andate troppo oltre, c'è la possibilità che sveniate e perdiate conoscenza.

Avvertenza: I risultati dell'uso del dispositivo **AirPhysio®** possono variare da persona a persona, in base a forma fisica, gravità dei problemi di muco e alle condizioni mediche preesistenti.

Attenzione: Pericolo di soffocamento

Tenere lontano dalla portata dei bambini e non consentire l'utilizzo del dispositivo **AirPhysio®** a bambini senza supervisione. Il dispositivo è progettato per essere aperto per la pulizia e quindi le parti interne possono portare a pericolo di soffocamento.

Come sbloccare il tappo superiore trasparente a prova di bambini

1. Ci sono due aperture nel dispositivo. Sentire per un piccolo sollevamento sopra l'apertura su uno dei due lati. Questo sollevamento indica il lato corretto del fermo di sicurezza che dovrà essere premuto.
2. Con il tappo trasparente in alto e puntato lontano da voi, posizionare il dispositivo verso il basso su una superficie dura.
3. Quindi, posizionare un oggetto a punta, ad esempio una penna, nella parte destra dell'apertura per premere il fermo di sicurezza.
4. Quindi sollevare il dispositivo e ruotare il tappo in senso antiorario.
5. Tirare il tappo lontano dal corpo blu.



1 - Identificare il lato con la sezione rialzata



2 - 5 Spingere una penna sul lato destro dell'apertura. Girare il tappo in senso antiorario e sollevarlo

Come faccio a pulire il dispositivo AirPhysio®?

Pulire il dispositivo è un bene per l'igiene e la prevenzione della diffusione di batteri e germi. La maggior parte delle persone trova necessario pulire il dispositivo dopo ogni sessione per rimuovere l'umidità e / o muco dai componenti interni.

1. Smontare il dispositivo in base alle istruzioni allegate, se necessario, o in alternativa pulire il dispositivo nel suo complesso.
2. Lavare il dispositivo in una soluzione di acqua di rubinetto e sapone delicato o soluzione disinfettante.
3. Risciacquare tutti i componenti o l'intero dispositivo con acqua del rubinetto.
4. Lasciare asciugare tutti i componenti o il dispositivo all'aperto a temperatura ambiente.
5. Conservare in un luogo pulito e asciutto.

Attenzione: la candeggina al cloro o altri prodotti contenenti cloro (ad esempio detersivo per lavastoviglie) non deve essere utilizzata per la pulizia

Componenti del dispositivo AirPhysio®

- 1 x Copertura resistente (Poli-carbonato)
- 1 x Bocchino e base (Poli-carbonato)
- 1 x Cono circolare (Poli-carbonato)
- 1 x Cuscinetto a sfera (Inox)



Condizioni di conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto al di fuori della luce solare diretta

Avvertenze e avvisi

Controindicazioni: Si prega di consultare il medico se si dispone di una delle seguenti condizioni prima di utilizzare il dispositivo **AirPhysio®**

- Pneumotorace non trattato;
- Tubercolosi;
- Emottisi (tosse del sangue);
- Chirurgia esofagea;
- Insufficienza cardiaca del lato destro;
- Patologia dell'orecchio medio, cioè rottura della membrana timpanica.

Grazie per l'acquisto

Come piccola azienda australiana, siamo orgogliosi dei nostri prodotti innovativi, e il nostro desiderio è migliori risultati e prestazioni attraverso una migliore respirazione.

Hai avuto qualche problema?

Se qualcosa non funziona, inviaci una mail via feedbackitaly@airphysio.com. Assicurati di dirci i dettagli di acquisto e una foto del problema.

Un piccolo favore, se hai acquistato online...

Se hai acquistato online, ti preghiamo di considerare una recensione. Appreziamo molto.

Registrati per la nostra garanzia gratuita di 12 mesi

Sosteniamo i nostri prodotti e offriamo una garanzia estesa di 12 mesi a condizione che tu abbia acquistato direttamente da noi o da un nostro agente autorizzato. Assicurati di registrarti per assicurarti di approfittare di questa offerta. Nell'improbabile caso di un problema, rimborseremo la spedizione per la riparazione o sostituiremo il prodotto per te.

Grazie ancora per l'acquisto. Siamo disponibili sette giorni su sette, e risponderemo velocemente a qualsiasi domanda tu abbia.

AirPhysio Pty Ltd

ABN 84607523697

Tweed Heads, NSW, Australia

Ph: +61 1300 257 710 / Int'l +61 7 3535 0640

www.airphysio.com

EMAIL: feedbackitaly@airphysio.com